

SNELSTART HANDLEIDING

5 stappen uit voor het gebruik van uw Tensi+

tensi+

5 STAPPEN



1

VOORBEREIDING

Plaats een druppel gel op elke elektrode.

De geleidende gel verbetert het contact tussen de elektroden en uw huid.



2


POSITIONEREN VAN DE TENSI+

Plaats de Tensi+ boven uw enkel. De onderste elektrode dient net onder en achter de malleolus (binnenzijde van de enkel) geplaatst te worden.



3


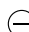
HET APPARAAT OPSTARTEN

Houdt de aan/uit knop  ingedrukt. De LEDs lichten op en u hoort een zachte, lange pieptoon.



4

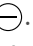

AANPASSEN VAN DE STIMULATIE-INTENSITEIT

Verhoog geleidelijk de intensiteit van de behandeling door de plusknop  ingedrukt te houden, tot u een lichte tinteling onder uw voet voelt. Indien de tinteling niet comfortabel aanvoelt, verlaagt u de intensiteit door de minknop  ingedrukt te houden.



5

BEHANDELING EN AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Uw Tensi+ behandeling begint nu. Het apparaat zal zich vergrendelen na 30 seconden inactiviteit. Om te ontgrendelen, drukt u op de minknop . Na 20 minuten zal het apparaat zich uitschakelen. Indien u het apparaat zelf wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit knop  ingedrukt.



VIDEOS

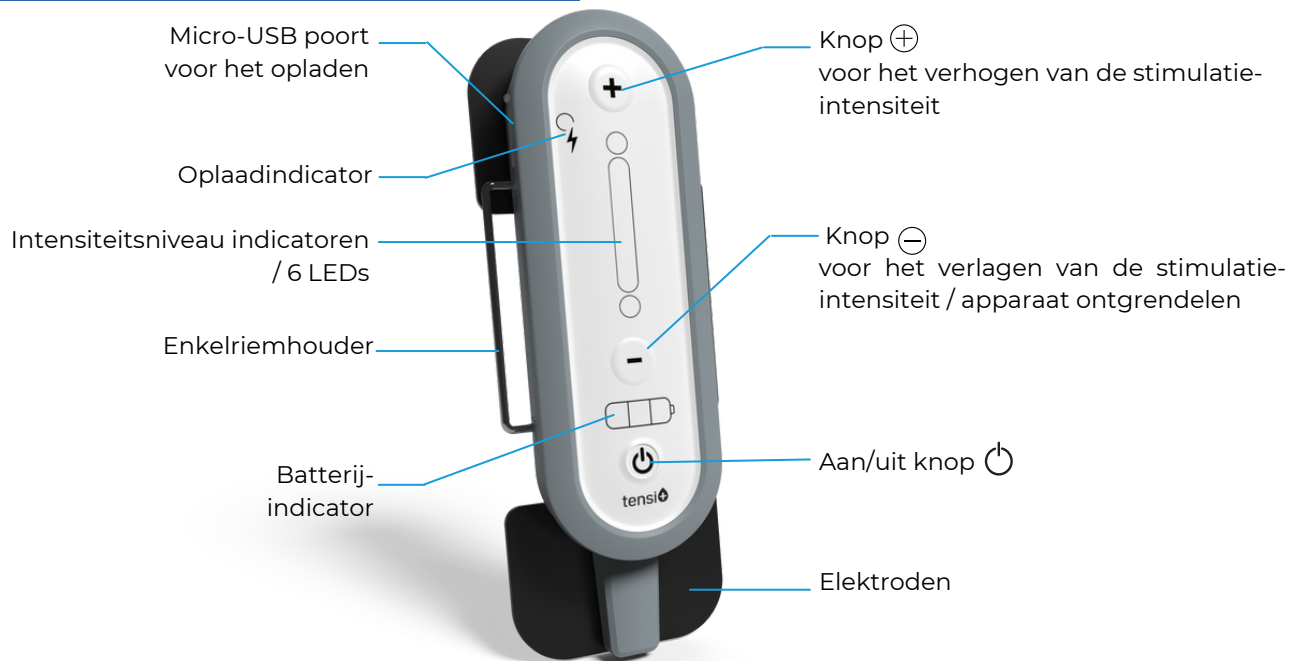
Bekijk bij twijfel een van de video's op onze website : tensiplus.com/nl.



Waarschuwing :

Lees alle indicaties en contra-indicaties in de instructies voorafgaand aan gebruik.

UW TENSI+



DE STIMULATIE-INTENSITEIT AANPASSEN

Ik voel een lichte tinteling onder mijn voet.



DE POSITIONERING EN HET CONTACT ZIJN GOED

Verminder de intensiteit iets door de minknop ⊖ ingedrukt te houden. Als u de tinteling niet meer voelt, dan is uw comfortniveau bereikt.

Ik voel geen tinteling onder mijn voet.



CONTROLEER HET APPARAAT

Zorg dat er voldoende gel op elke elektrode aanwezig is en/of pas de positie van het apparaat op uw enkel aan. Soms ervaren gebruikers geen tinteling. Dit betekent niet altijd dat uw apparaat niet werkt. Als dit gebeurt, bespreek dit dan met de arts die u de Tensi+ heeft voorgeschreven.

Mijn Tensi+ begint te knippen tijdens de behandeling



TENSI+ IS LOSGEKOPPELD

Uw Tensi+ is het contact met uw huid gedurende meer dan 1 seconde verloren. Beweeg het apparaat iets om de nervus tibialis te vinden en zorg ervoor dat er voldoende gel op elke elektrode aanwezig is voor de geleiding. Bekijk bij twijfel een van de video's op onze website: tensiplus.com.

Ik kan het intensiteitsniveau van de LEDs niet verhogen.



HET MAXIMUM VOLTAGE IS BEREIKT

Indien uw Tensi+ apparaat 3, 4 of meer LEDs blijft aangeven, betekent dit dat de maximum intensiteit van 50 mA is bereikt op basis van de weerstand van uw huid. Uw huid is in staat om de geleiding van elektriciteit te remmen. Het apparaat zal een hogere intensiteit bereiken indien de huid meer elektriciteit geleidt en een lagere intensiteit aanhouden indien de huid minder elektriciteit geleidt.

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR HANDIGE TIPS EN VIDEO'S

www.tensiplus.com/nl



20 bis rue Barthélemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
Frankrijk

Stimuli
TECHNOLOGY



tensiplus.com/nl